

Actimove[®]

GenuMotion

life

Kniebrace



Designpreis
Deutschland
2010
NOMINEE




product
design
award
2009 gold



reddot design award
winner 2009

BSN medical



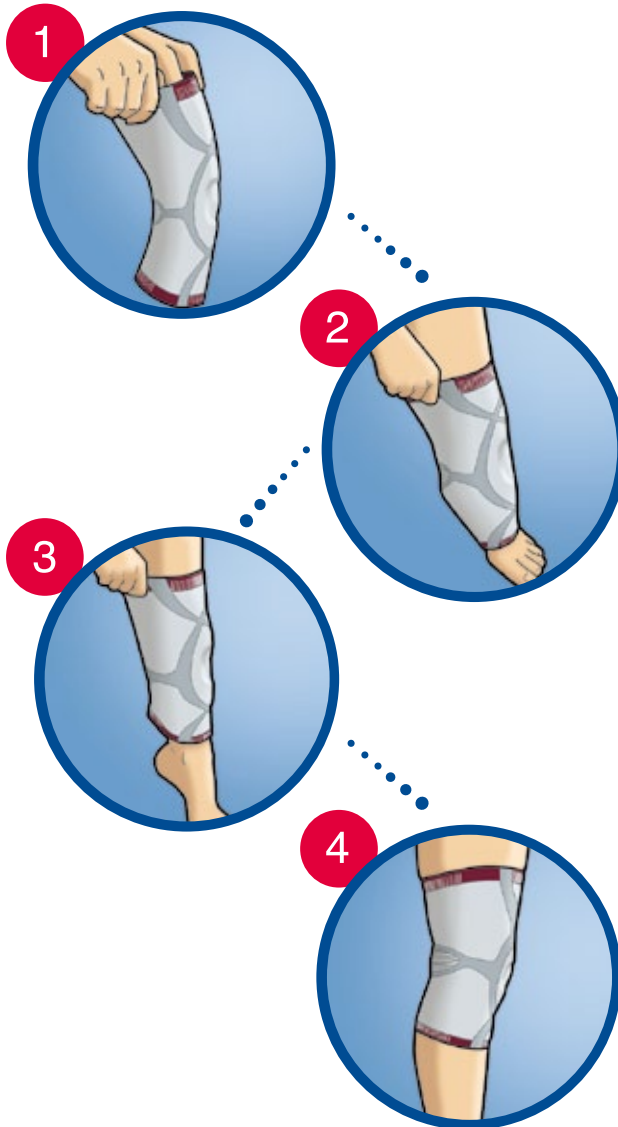

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw keuze voor Actimove® GenuMotion. Dit product is met zorg ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met orthopedische specialisten. Aan elk detail is gedacht om aan uw verwachtingen te voldoen.

Actimove® GenuMotion is een dynamische kniebandage met geavanceerde 3D-breitechnologie voor optimale druk, stabiliteit en luchtdoorlaatbaarheid. Hoogwaardige, latexvrije garens bieden zachtheid en langdurig comfort. Het high-tech stippelpatroon zorgt voor een zachte massage aan het gebied rond de knie, terwijl de ring rond de knieschijf deze op de juiste plaats houdt.

Volg de hieronder beschreven instructies.

Indicaties:

Actimove® GenuMotion is geïndiceerd voor gonartrose en artritis, kraakbeenverweking met of zonder terugkerende zwellingen in de gewrichten, licht meniscusletsel, fibromyalgie en lichte instabiliteit van het kniegewricht. Gebruik wordt ook aanbevolen bij postoperatieve en posttraumatische irritatie.

Contra-indicaties:

Gebruik Actimove® GenuMotion niet als u lijdt aan stoornissen in de lymfedoorstroming of stoornissen in de bloedsomloop van de onderste ledematen.

Gebruik:

Stap in uw Actimove® GenuMotion en plaats de stabiliserende kniepelotte op de juiste plaats rond uw knieschijf. U kunt nu op eenvoudige wijze uw Actimove® GenuMotion verstellen, zodat deze goed aansluit en comfortabel zit (zie afbeeldingen 1–4 voor details).

Let op: uw Actimove® GenuMotion moet de eerste keer aangebracht worden door een arts, orthopeed of een daarvoor opgeleide specialist.

Reiniging & verzorging:

Actimove® GenuMotion kan met de hand of in de wasmachine gewassen worden (gebruik het handwasprogramma op 30 °C). Om de vorm en medische druk van uw kniebandage te behouden; niet bleken, chemisch reinigen, strijken of drogen in de droger!

Voorzorgsmaatregelen:

Volg de behandelingsadviezen van uw arts. Als u ongemak, gevoelloosheid, verkleuring van de huid of zwelling ervaart tijdens het dragen, dient u Actimove® GenuMotion niet meer te gebruiken en contact op te nemen met uw arts.

80% Polyamide
20% Elastane

LATEX
FREE
FORMULA



BSN medical GmbH
D-22771 Hamburg, Germany
www.bsnmedical.com

Made in Germany